

Liquordiagnostik	Einsender Informationen
Revision: 000/01.2026	DIN EN ISO 15189:2024-08: 7.2 Präanalytische Verfahren EN ISO/IEC 17020:2012: 5.1_Verwaltungstechnische Anforderungen

I. Präparation und Versand von Liquor

Für die zytologische und immunhistochemische Beurteilung von Liquor und Zystenpunktionen ist die Einsendung von ungefärbten Zytospinpräparaten (ca. 6 – 8 beschichtete Objektträger) zu empfehlen. *Alternativ* kann bei kurzen Transportwegen (unter 1 Stunde) der native, unfixierte Liquor/Zystenpunktat (telefonische Ankündigung), bei längerem Transportweg fixierter Liquor/Zystenpunktat (Fixation: 1:1 mit 70% Alkohol; um eine Autolyse der Zellen zu vermeiden) versendet werden.

Durchflusszytometrische Diagnostik (FACS) zum Klonalitätsnachweis erfolgt im **Institut für Laboratoriumsmedizin, Feulgenstr. 12, 35392 Gießen.**

II. Probenannahme: Montag bis Freitag 7.30-14.30 Uhr

III. Kontakt

Eingangslabor: Fr. Stephan

Tel. 0641/99-41192

Sekretariat: Frau Adolph

Tel. 0641/99-41181
(neuropathologie@uk-gm.de)

Für weitere Auskünfte und Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Probengefäße, Versandboxen und Fixationslösungen können bei uns angefordert werden.

Bearbeitung durch: Stephan, Chiana	Freigegeben durch: Acker, Till	ID: 44239	Seite 1 von 1
Geprüft (inhaltlich) durch: May, Annika	Datum: 12.01.2026	Dateiname: Informationen für Einsender - Liquordiagnostik.docx	